

Bedienungsanleitung equimag expert

Vielen Dank, dass Sie sich für equimag entschieden haben. Wir sichern Ihnen eine qualitativ hochwertige Verarbeitung, gefertigt

mit ♥ Made in Germany und bestmögliche technische Umsetzung des seit über 20 Jahren erfolgreich eingesetzten equimag Impulses zu.

*Der von equimag entwickelte Impuls
ist für den Behandlungserfolg grundlegend.*

In der pulsierenden Magnetfeld-Behandlung werden viele verschiedenartige Impulse eingesetzt, die alle auf ihre Weise einen Behandlungserfolg für sich in Anspruch nehmen.

Der Impuls von equimag ist aufgrund der besonderen, erfolgsversprechenden technischen Gegebenheiten bei Tausenden von Anwendern erprobt.

Seit 2001 erhalten wir aus unserem sehr großen Anwenderpotential für die verschiedensten Anforderungen der Pferde- und Kleintieranwendung Erfahrungs- und Erfolgsberichte.

Diese Kundenreferenzen sind mit unseren wissenschaftlichen

Untersuchungen die Grundlage für eine stete Weiterentwicklung der pulsierenden equimag Magnetfeld-Therapie.

Um diesen Erfolg auch für Sie als Anwender sicher zu stellen, bitten wir Sie, diese Anwenderinformation vor Inbetriebnahme zu lesen. Wir haben uns dabei bewusst kurz und hoffentlich gut verständlich ausgedrückt.

Informationen zu den Einsatzgebieten der einzelnen Programme und Programm-kombinationen finden Sie unter „Die Grundprogramme“ und „Programm-kombinationen“.

Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung equimag expert	0
<i>Lieferumfang der equimag expert-Systeme</i>	<i>3</i>
equimag expert Grundausstattung für Pferde.....	3
equimag expert Profi-Set für Pferde	5
equimag expert Gamaschenset	6
equimag expert Kleintier-Set.....	7
<i>equimag expert Impuls-Steuergerät.....</i>	<i>8</i>
LED-Anzeige im Display (G).....	10
Anlegen und Betrieb der equimag expert-Applikatoren.....	12
Stromversorgung des equimag Steuergeräts	17
Externes Netz-Lade-Teil.....	17
Batterie / Akku Wechsel am equimag expert Steuergerät	18
Fehlermeldungen	19
<i>Tipps zur Anwendung – Reinigung.....</i>	<i>20</i>
Sehr kleine Pferde, Ponys und Kleintiere	20
Reinigung der Applikatoren	20
<i>Weitere Informationen</i>	<i>21</i>
Rechtliche Hinweise	21
Haftung	21
Service.....	21
Kontakt	22
Garantie	23

Lieferumfang der equimag expert-Systeme

equimag expert Grundausrüstung für Pferde

- ✓ equimag expert Decken-applikator. Ganzkörperdecke (ca. 3 kg) mit einer Deckengröße (vom Widerrist bis zum Schweifansatz) von ca. 140 cm, die Gesamtlänge beträgt ca. 175 cm. Durch die Klettverbindung am Brustverschluss kann die Decke für die unterschiedlichen Pferdegrößen variabel angepasst werden.
- ✓ Lederring für den Brustverschluss. Standardgröße mit einem Durchmesser von ca. 15 cm. Größere Durchmesser gegen Aufpreis erhältlich.
- ✓ Verstellbarer Schweifgurt zur Anpassung an unterschiedliche Pferdegrößen
- ✓ equimag expert Steuergerät – das Herzstück des equimag Systems: der Impulsgeber
- ✓ Lederetui: Steuergeräteschutzhülle mit aufgeklebter Kurzanleitung Programmwahl und Bedienung zur sicheren Befestigung des Steuergeräts am Bauchgurt
- ✓ Elastischer Gummi-Bauchgurt mit Klettverschlüssen zur Befestigung der Geräteschutzhülle für das Steuergerät und zur Fixierung der Magnetfelddecke am Pferd
- ✓ Lade-Netzteil – zum externen Laden der Akkus mit USB Out-Buchse
- ✓ USB Kabel für die Stromversorgung des equimag expert Steuergeräts am Stromanschluss (über das Lade-Netzteil) oder an einem Powerpack (Powerpack ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs).
- ✓ Zwei Akku-Sets (à vier Stück, wiederaufladbar). Ein Set befindet sich bereits im Steuergerät eingelegt und ist mit Solarstrom für den sofortigen Einsatz bereits vorgeladen. Das zweite Set wird mit dem Lade-Netzteil geliefert.
- ✓ große Transporttasche mit Innen- und Seitentasche für das Zubehör
- ✓ Reinigungs-Konzentrat cdVet BIOCLEAN, Microfasertuch, Sprühflasche zum Ansetzen der Reinigungslösung



Abbildung 1: Bestandteile der equimag expert Grundausrüstung

equimag expert Profi-Set für Pferde

wie Grundausstattung,

zusätzlich:

- ✓ equimag expert Halsteil
- ✓ zwei equimag expert Gamaschenapplikatoren mit Klettverschlüssen und Anschlusskabel, die von der Länge her vom Steuergerät bis zu den Hinterbeinen eines Pferdes reichen.
- ✓ equimag expert Intensivstab zur lokalen Behandlung
- ✓ Zubehörtasche
- ✓ zwei Y-Adapter für den Anschluss und den Betrieb von bis zu vier Applikatoren gleichzeitig am Steuergerät

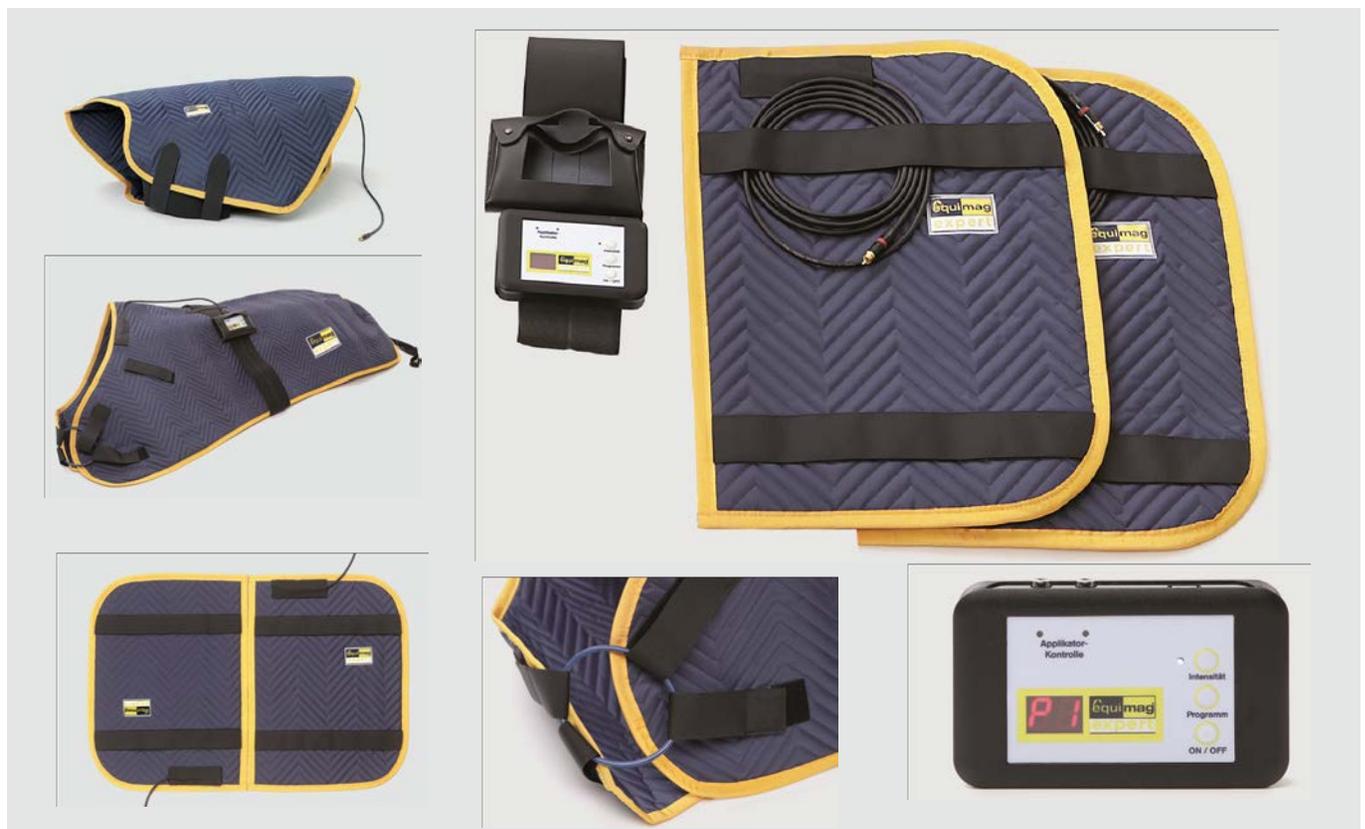


Abbildung 2: Lieferumfang equimag expert Profi-Set

equimag expert Gamaschenset

anwendbar bei kleineren Equiden, Ponys oder als Liegefläche für Hunde

- ✓ zwei equimag expert Gamaschen-Applikatoren mit Klettverschlüssen
- ✓ equimag expert Steuergerät – das Herzstück des equimag Systems: der Impulsgeber
- ✓ Lederetui: Steuergerätetasche mit aufgeklebter Kurzanleitung Programmwahl und Bedienung zur sicheren Befestigung des Steuergeräts am Bauchgurt
- ✓ Elastischer Gummi-Bauchgurt mit Klettverschlüssen zur Befestigung der Gerätetasche für das Steuergerät
- ✓ Lade-Netzteil – zum externen Laden der Akkus mit USB Out-Buchse
- ✓ USB Kabel für die Stromversorgung des equimag expert Steuergerät am Stromanschluss (über das Lade-Netzteil) oder an einem Powerpack (Powerpack ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs).
- ✓ Zwei Akku-Sets (à vier Stück, wiederaufladbar). Ein Set befindet sich bereits im Steuergerät eingelegt und ist mit Solarstrom für den sofortigen Einsatz bereits vorgeladen. Das zweite Set wird mit dem Lade-Netzteil geliefert.
- ✓ Reinigungs-Konzentrat cdVet BIOCLEAN, Microfasertuch, Sprühflasche zum Ansetzen der Reinigungslösung
- ✓ Transporttasche für Gamaschen und Zubehör



Stand der Dokumentation 2021-06 V1. Änderungen vorbehalten.
© equimag GmbH 2021. Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe.

equimag expert Kleintier-Set

anwendbar als Liegefläche für Hunde, Katzen oder Jungtiere


- ✓ equimag expert Kleintier-Applikator: Magnetfeldmatte mit einer Liegefläche von ca. 70 x 90 cm
- ✓ equimag expert Steuergerät – das Herzstück des equimag Systems: der Impulsgeber
- ✓ Lederetui: Steuergeräteschutzhülle mit aufgeklebter Kurzanleitung Programmwahl und Bedienung zur sicheren Verwahrung des Steuergeräts
- ✓ Lade-Netzteil – zum externen Laden der Akkus mit USB Out-Buchse
- ✓ USB Kabel für die Stromversorgung des equimag expert Steuergerät am Stromanschluss (über das Lade-Netzteil) oder an einem Powerpack (Powerpack ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs).
- ✓ Zwei Akku-Sets (à vier Stück, wiederaufladbar). Ein Set befindet sich bereits im Steuergerät eingelegt und ist mit Solarstrom für den sofortigen Einsatz bereits vorgeladen. Das zweite Set wird mit dem Lade-Netzteil geliefert.
- ✓ Transporttasche für das Kleintier-Set



Abbildung 4: equimag expert Kleintiermatte

equimag expert Impuls-Steuergerät

Das equimag expert Steuergerät ist das Herz des equimag Magnetfeld-Therapie Systems. In diesem Gerät wird der einzigartige equimag Impuls erzeugt und mittels eines elektromagnetischen Feldes über die Magnetfeld-Applikatoren in den Körper des zu behandelnden Tieres weitergeleitet.

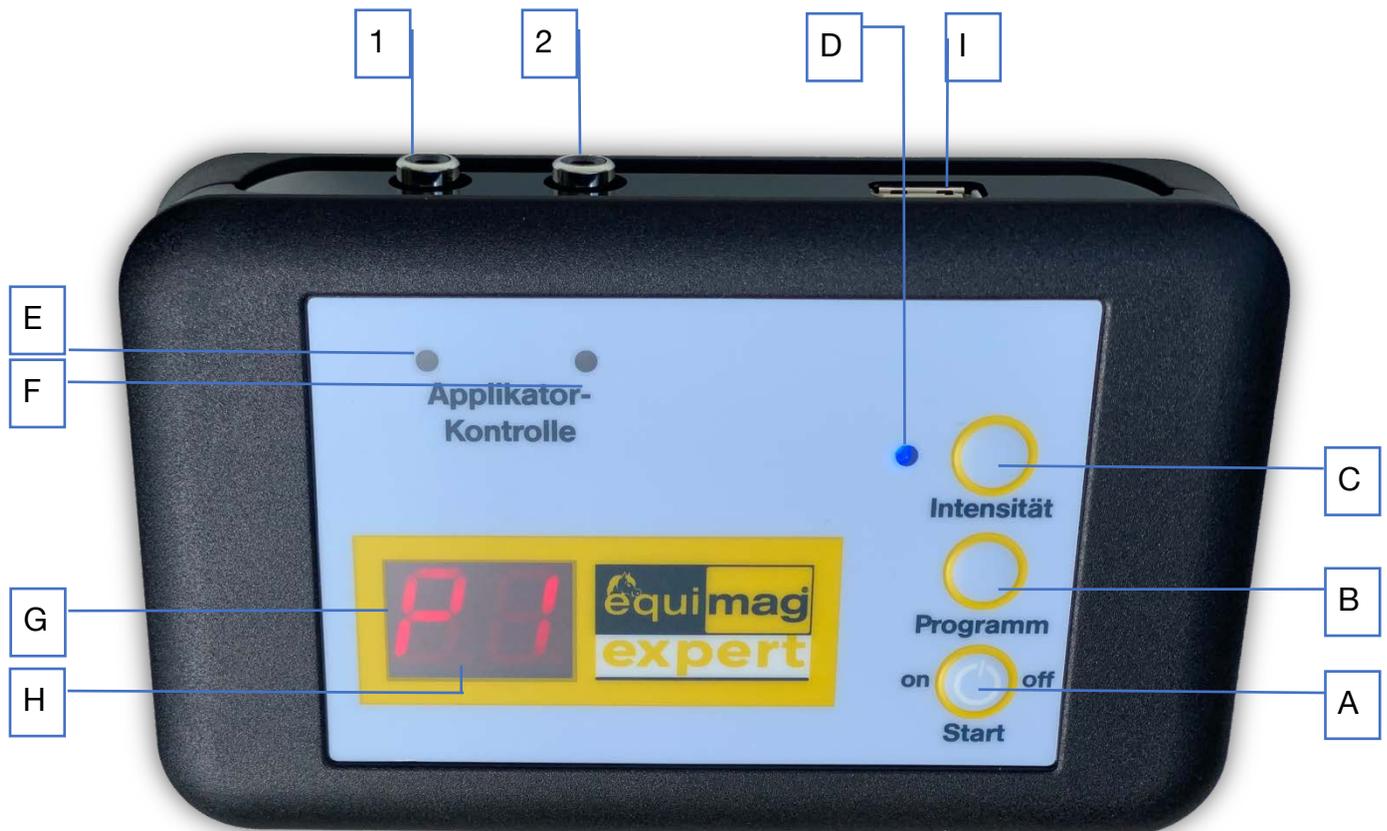

Anzeige-Elemente des equimag expert Steuergerätes

1 und 2	Buchsen für Applikatoren	frei wählbar. Mit Y-Adapter auf bis zu vier Anschlussmöglichkeiten erweiterbar
A	on / off-Taste	<p>1 Sekunde gedrückt halten, bis die Programmanzeige im Fenster erscheint.</p> <p>Wird der Taster länger festgehalten, wird der Ladezustand der Akkus eingeblendet.</p> <p>Ist kein Applikator eingesteckt, schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.</p> <p>Zum Start des gewählten Programms die on / off Taste erneut drücken. Die</p>

		Kontroll-LEDs der Applikator-Kontrolle leuchten bei eingesteckten Applikatoren blau.
B	Programm-Wahl	Programme 1 – 8. Mit jedem Tastendruck wird das nächsthöhere Programm gewählt. Beim Einschalten wird das zuletzt verwendete Programm voreingestellt.
C	Wahltaste für die Intensität	Mit Drücken der Taste wird zwischen den Intensitäten 50 und 100% gewechselt.
D	Intensitäts-Anzeige	LED leuchtet nicht: 50% LED leuchtet blau: 100 %
E und F	Applikator Kontrollanzeige	E = Applikator in Buchse 1 eingesteckt F = Applikator in Buchse 2 eingesteckt Die Kontroll-LED leuchtet, wenn ein Applikator eingesteckt ist und ein Programm läuft. Bei fehlendem Leuchten der LED trotz eingestecktem Applikator liegt möglicherweise ein Defekt am Applikator vor. Siehe auch Fehlerbehandlung.
G	LED-Anzeige	für Programmwahl, Restprogramm-laufzeit, Ladezustand Akku, Fehleranzeige
H	Dezimalpunkt	Wenn der Dezimalpunkt blinkt, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Bitte wechseln Sie die Batterien oder Akkus.
I	USB-Buchse	Kann zur direkten Stromversorgung über das Netzteil des Ladegeräts (USB Out-Buchse des Ladegeräts) oder eines Powerpacks genutzt werden. Bei Nutzung der externen Stromversorgung wird die Segmentanzeige EP (E xtern P ower) eingeblendet. Die USB-Buchse kann nicht zur Datenübertragung genutzt werden.

LED-Anzeige im Display (G)

Programm-Nr. P 1 – P 8	Das gewählte und eingestellte Therapieprogramm wird mit seiner Nummer und einem voran gestelltem „P“ angezeigt.
Therapiezeit	Nach zwei Sekunden wechselt die Anzeige abwechselnd zwischen Programm Nummer und Therapiedauer hin und her. Während eines Programmablaufs werden neben der Programm-Nummer die verbleibenden Minuten bis zum Therapie-Ende angezeigt.
Fehler	Ein Fehler wird mit einer Fehlernummer und vorangestellten „E“ angezeigt. Siehe Fehleranzeige

Ein- und Ausschalten des Steuergerätes (Taste A)

Einschalten

1.	Stecken Sie einen Applikator in die Buchse 1 oder 2
2.	Drücken Sie die on / off Taste (A) für 1 Sekunde
3.	Wählen Sie die Intensität (Taste C) 50% Intensität: keine LED (D) 100% Intensität: blaue LED (leuchtet) D
4.	Wählen Sie das gewünschte Programm 1 bis 8 (Taste B)
5.	Wenn Sie alle Einstellungen ausgewählt haben, bestätigen Sie mit erneutem Drücken der on / off- Taste (A) den Start des Programmablaufs.
6.	Erst wenn das Programm läuft, leuchtet die blaue LED Kontrollleuchte (E / F), die gleichzeitig als Funktionskontrolle für die Applikatoren dient.

Hinweis zur Programmwahl: Beim Einschalten des Steuergeräts wird immer das zuletzt verwendete Programm und Intensität gewählt (Memory Effekt).

Prüfen des Ladezustandes der Akkus:

Durch Drücken und Festhalten der on / off Taste (A) wird der Zustand der eingelegten Akkus angezeigt:

LED-Anzeige (G)	Bedeutung
Segmentanzeige 60 bis 99	Guter bis sehr guter Ladezustand
Segmentanzeige 40 bis 60	Mittlerer Ladezustand
Segmentanzeige 00 bis 40	Schlechter Ladezustand, Akku/Batterie demnächst wechseln
Blinkender Dezimalpunkt (H)	Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Akkus/Batterien wechseln oder Gerät mit externer Stromversorgung über die USB-Buchse betreiben.
EP	Externe Stromversorgung über die USB-Buchse aktiviert

Ausschalten

Das equimag expert Steuergerät schaltet sich automatisch nach 15 Sekunden aus,

- wenn kein Applikator angeschlossen ist oder erkannt wurde
- kein Therapieprogramm gestartet wurde
- die reguläre Therapiezeit beendet ist

Ein manuelles Ausschalten bewerkstelligen Sie mit drücken der on / off-Taste für mindestens 1 Sekunde.

Anlegen und Betrieb der equimag expert-Applikatoren

Magnetfelddecke

Legen Sie den gewünschten Applikator (Magnetfelddecke, Halsapplikator) auf ihr Pferd auf. Der Deckenapplikator wird über den Rücken des Pferdes gelegt und an der Brust mittels des Klettverschlusses um den Lederring auf die Größe Ihres Pferdes eingestellt.



Der Schweifgurt sollte immer angelegt sein, so dass die Decke einen sicheren Halt am Pferd hat. Befestigen Sie den Schweifgurt rechts und links vom Schweif an der Decke.

Der Bauchgurt dient dem besseren Halt der Decke sowie der Befestigung des Steuergerätes. Stecken Sie das Steuergerät in die Gerätetasche.

Führen Sie den Bauchgurt durch die hintere Schlaufe des Leder-Etuis. Die Gerätetasche wird dann mit einem Klettband am Bauchgurt fixiert.

Legen Sie nun den Bauchgurt um die Decke, spannen und verschließen Sie ihn. Der Bauchgurt wird auf der Decke mit Klett-/Flauschband befestigt.

Es ist nicht erforderlich, dass der Decken-Applikator an allen Stellen direkt am Körper aufliegt.

Stecken Sie nun den Stecker des Decken-Applikators in die Buchse 1 oder 2 des Steuergerätes und legen Sie zunächst weitere Applikatoren an oder fahren Sie wie im Abschnitt Ein- und Ausschalten des Steuergerätes beschrieben fort.

Applikations-Parameter: Der equimag Impuls ist der bewährte exponentielle Impuls. Die Polarität des Impulses wird periodisch in kurzen Abständen automatisch geändert (Nord – Süd / Süd – Nord).

Gamasche

Gelenkapplikation: Befestigen Sie eine Gamasche mit Klettbindern am zu behandelnden Gelenk. Die Gamasche kann an allen vier Beinen und allen Gelenken eingesetzt werden.

Für die Verwendung an den Beinen legen Sie die Gamasche um das gewünschte Gelenk und befestigen Sie die Gamasche mit den drei Klettbindern. Dabei sollten zwei Klettbindern oberhalb des Gelenkes sitzen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten und ein Abrutschen zu verhindern.

Bei der Verwendung an den Hintergliedmaßen führen Sie das

Kabel unter dem Schweifgurt hindurch zum Steuergerät.

Die Gamaschen sind sehr geschmeidig und gestatten sehr viel Bewegungsfreiheit.

Beim Anlegen am Sprunggelenk ist es von Vorteil, die Gamasche nach hinten offen zu halten. Sollte das Pferd sein Bein anwinkeln, so ist mehr Bewegungsfreiheit gegeben. Eine zusätzliche Gamasche wird mittels der Klettbindern am gewünschten Gelenk befestigt und der Stecker wird in die noch freie Buchse des Steuergerätes gesteckt.



Haben Sie bereits zwei Buchsen des Steuergerätes mit anderen Applikatoren belegt, nutzen Sie einen Y-Adapter, um die Anschlussmöglichkeiten der Buchsen zu erweitern. Es ist auch bei den von equimag zur Verfügung gestellten Y-Adaptoren gewährleistet, dass der equimag Impuls mit minimalen Einschränkungen die erwünschte Wirkung erzielt.

Halsteil

Das Halsteil wird mit der Decke durch die Klettverbindung am vorderen Teil der Decke befestigt. Sie haben dabei die Möglichkeit, den Sitz des Halsteils zu korrigieren - je nach Größe des Pferdes. Mit 2 Klett-/Flaschverbindungen wird das Halsteil dann verbunden.

Es sollte nicht zu straff sitzen, damit das Pferd den Hals noch nach unten strecken kann.

Stecken Sie den Stecker in eine der freien Applikatorbuchsen des Steuergerätes.



Haben Sie bereits zwei Buchsen des Steuergerätes mit anderen Applikatoren belegt, nutzen Sie einen Y-Adapter, um die Anschlussmöglichkeiten der Buchsen zu erweitern.

Intensivstab

Der Intensivstab wird für Anwendungen genutzt, bei denen eine lokale, intensive Behandlung erforderlich ist. Auch in Körperregionen, die schlecht oder gar nicht mittels der sonstigen Applikatoren erreichbar sind, ist die lokale Anwendung des Intensivstabs angebracht.

Bei Verwendung des Intensivstabes wird zunächst der Anschlussstecker in eine Applikatorbuchse des Steuergerätes gesteckt. Der Intensivstab sollte immer nur als weiterer Applikator, z.B. zusätzlich zum Decken-Applikator, verwendet werden. Wählen Sie bei Bedarf unter Verwendung des Intensivstabs das Programm 1 oder Programm 8 und

achten Sie selbst auf die Behandlungszeit.

Halten Sie nun die schwarze Abdeckung auf die gewünschte Stelle.

Die Anwendungszeit mit dem Intensivstab beträgt drei bis fünf Minuten und sollte diese Dauer nicht überschreiten.

Anwendungen an den Augen sollten nicht länger als drei Minuten dauern. Nehmen Sie den Stab in die Faust, so dass die Hand einen Schutz für das Auge bietet. Bewegen Sie den Stab nicht hin und her, sondern setzen ihn an verschiedenen Punkten an.



Abbildung 5: equimag expert Intensivstab

Optionale Erweiterungen

Sie können ohne Adapterstecker einen oder zwei Applikatoren an das Steuergerät anschließen. Mit zwei Y-Adaptern (im Lieferumfang des Profi-Set enthalten) sind bis zu vier Applikatoren an das Steuergerät anschließbar.

Ein Adapter-Stecker enthält einen Stecker und zwei Buchsen. Somit können Sie an jedem Y-Adapter zwei Applikatoren mit dem Steuergerät verbinden.

Bedenken Sie, dass bei vier Applikatoren ein kleiner Energieverlust entsteht. Es ist ratsam, dann getrennte Anwendungen durchzuführen, z.B. Halsteil und Decke, evtl. Intensivstab oder zwei Gamaschen und Decke.

Zur Prophylaxe-Behandlung können Sie alle vier Ausgänge des Steuergerätes nutzen.

Der Y-Adapter ist separat bei equimag erhältlich.



Abbildung 6: Y-Adapter zur Erweiterung der Anschlussbuchsen beim equimag expert Steuergerät

Programmwahl	Anwendung Grundprogramme	Laufzeit in Min.
P1 - Basis	<p>Einschleichen bei Erstbehandlungen über 1 – 2 Tage mit max. 50% Intensität</p> <p>Bei Entzündungen, Schwellungen, Wunden, Schmerzen, Gelenkentzündungen, Sehnenentzündungen, Kolik (nur Entkrampfung), Hufgeschwüren, akuten Atemwegserkrankungen.</p> <p>Das Basis-Programm sollte Bestandteil jeder Behandlung sein.</p>	20
P2 - Vital	<p>Energieaufbau, Bewegungsmangel, im Training, zur Leistungssteigerung, bei chronischen Gelenkserkrankungen, begleitend bei Stallruhe, bei chronischen Atemwegserkrankungen und Allergien.</p>	12
P3 – Relax	<p>Zur Regeneration bei Knochen-, Knorpel-, Sehnen-Beanspruchung, bei Muskelverspannungen und Nervosität sowie zur Regeneration nach dem Reiten (Schutz vor Muskelkater / Übersäuerung).</p>	16

Programmwahl	Anwendung Kombinationsprogramme	Laufzeit in Min.
P4 - Basis & Vital	<p>Zur Regulierung der Zell-Energie, Verbesserung des Gesamtstoffwechsels, für einen verbesserten und beschleunigten Heilungsprozess, einen besseren Blutfluss in den Gefäßen, eine bessere Versorgung der Muskulatur sowie des Organismus mit Nährstoffen, Lösen von Blockaden im Körper.</p>	32
P5 - Basis & Relax	<p>Wenn keine Entzündungsprozesse angezeigt sind, wird die Körperfunktion reguliert und eine Entspannung, besonders nach der Arbeit, angeregt. Für eine Unterstützung der Knochen- und Knorpel-Regeneration, besonders bei Pferdesenioren.</p>	36
P6 – Vital & Relax	<p>Energie-Regulierung mit nachwirkender Entspannung. Besonders geeignet nach der Arbeit und/oder zur Prophylaxe für den folgenden Tag.</p>	16
P7 - Basis & Vital & Relax	<p>Anzuwenden wie P6, jedoch lindert es zusätzlich einen durch die Arbeit entstehenden Entzündungsvorgang; unterstützend auch im Einsatz bei nervösen Pferden.</p>	48
P8 – Prophylaxe	<p>Programm für „Zwischenanwendungen“; wirkt mit allen Frequenzen von 1 bis 30 Hz.</p>	15

Stromversorgung des equimag Steuergeräts

Das equimag expert Steuergerät ist nicht fest mit den Applikatoren verbunden und kann über verschiedene Wege mit Strom versorgt werden:

- handelsübliche Batterien (4 x AA / Mignon) - nicht wieder aufladbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 x Ni-MH 1,2V AA MIGNON HR6- Akku mit mindestens 2100 mAh. Im Lieferumfang enthalten, mit Solarstrom vorgeladen und wiederaufladbar.
- externe Stromversorgung über die USB-Buchse des Steuergeräts und dem mitgelieferten USB-Kabel mittels:

- 5W USB Power Adapter Netzteil – wie sie häufig für Smartphones verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



- Powerbank mit USB-Out Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten)



- Externes Netz-Ladeteil mit USB-Out Buchse (im Lieferumfang enthalten)



Die interne Stromversorgung über Akku / Batterie ist abgeschaltet, wenn das Steuergerät über die externe Stromversorgung betrieben wird.

Die Segmentanzeige zeigt „EP“ (external power)

Externes Netz-Lade-Teil

Im mitgelieferten Akku-Ladegerät können jeweils vier Akkus gleichzeitig geladen werden (siehe [Varta Bedienungsanleitung](#)).



Batterie - / Akku Wechsel am equimag expert Steuergerät

Öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite des Steuergerätes mit Hilfe der Lasche, die Sie leicht in Richtung der kreisförmigen Öffnung drücken (z.B. mit dem Fingernagel) und gleichzeitig nach oben ziehen.



Lasche auf der Rückseite des Steuergerätes

Entfernen Sie immer den kompletten Satz Akkus oder Batterien.

Legen Sie immer einen **vollständigen** Satz frisch geladener Akkus oder neuer Batterien ein.

Achten Sie beim Einlegen der Akkus oder Batterien auf die richtige + / - Polung (+ / - im Gehäuse eingepreßt).

Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch des Steuergerätes Akkus und Batterien, da diese auslaufen können.

Die Lebensdauer von NiMH-Akkus ist begrenzt und lassen sich nur n-Mal aufladen. Wie viele Ladezyklen ein Akku übersteht, hängt von der Qualität des Akkus, der Ladegeschwindigkeit und der Qualität des Ladegeräts ab (selbständige Abschaltung bei voller Ladekapazität u.a.). Die Angaben der Hersteller reichen von 400 – 1.000 Mal.

Wir empfehlen einen Austausch der handelsüblichen NiMH-Akkus alle

zwei Jahre, da ein Energieverlust entstehen kann.

Wie lange das equimag expert Steuergerät mit einem vollen Satz Akkus betrieben werden kann, hängt ebenfalls von vielen Faktoren ab: Anzahl angeschlossener Applikatoren, Programmlaufzeiten, Umgebungstemperatur, Ladekapazität und Alter der Akkus oder Batterien, ... Daher kann keine generelle Angabe darüber gemacht werden.

Fehlermeldungen

Alle Fehlfunktionen werden auf dem Display für ca. vier Sekunden angezeigt.

E1	Interner Speicherfehler	alle Stromquellen (Batterie / Akku / Netzteil) entfernen. Wenn nach kurzer Wartezeit und wieder eingelegten Akkus der Fehler weiter auftritt, muss das Gerät eingeschickt werden.
E2	kein Applikator	Applikator anschließen oder prüfen
E3	Applikator links (E)	Elektronik des Ausgangsverstärkers ist defekt
E4	Applikator rechts (F)	Elektronik des Ausgangsverstärkers ist defekt
E6	Benutzerlaufzeit	Anfrage beim equimag-Service unter Telefon: 06151 307 67 47 oder E-Mail info@equimag.de

Tipps zur Anwendung – Reinigung

Sehr kleine Pferde, Ponys und Kleintiere

Bei sehr kleinen Pferden und Ponys kann mit den zwei Gamaschen eine Rückenauflage hergestellt werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Klettbänder erlauben es, die Gamaschen zusammen zu halten. Legen Sie zusätzliche den elastischen Bauchgurt um, um die Rückenauflage zu fixieren.

Für die Anwendung bei Kleintieren bietet sich ebenfalls die Anwendung mit Gamaschen-Applikatoren an. Bei sehr großen Hunden können zwei Gamaschen verwendet werden. Verbinden Sie mit den Klettbändern die beiden Gamaschen.

Oder nutzen Sie alternativ unser Kleintier-Set. Die Kleintiermatte können Sie auch ohne Steuergerät erwerben, wenn Sie bereits im Besitz eines equimag expert Sets (Profi-Set oder Grundausstattung) sind.

Kleintiere (Hunde, Katzen) können einfach auf die Gamasche gesetzt werden. Es ist zu empfehlen, den Applikator **unter** eine Hundedecke o.ä. zu legen. Die Intensität wird dadurch nicht eingeschränkt. Ebenso besteht die Möglichkeit, das Tier mit der Gamasche einzudecken.

Reinigung der Applikatoren

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungs-Set können Sie eine besonders schonende und intensive Reinigung der Applikatoren durchführen. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungsmittel cdVet - Bioclean-Konzentrat.

Bioclean ist ein kraftvoller biologischer Allround-Reiniger zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

- Gründlich, schonend und dabei umweltfreundlich
- Biologisch voll abbaubar

- Gute Materialverträglichkeit
- Keine Geruchsbeeinträchtigung
- Entfernt den Nährboden für Krankheitserreger

Anwendung: Mischen Sie das Konzentrat laut Herstellerangaben. Sprühen Sie den Applikator ein und lassen Sie die verdünnte Lösung ca. drei Minuten einwirken. Anschließend wischen Sie mit einem nassen Tuch oder Schwamm den Applikator ab und trocknen ihn dann.

Bei Bedarf oder starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang.

Weitere Informationen

Rechtliche Hinweise

Die equimag Impulse, die Einstellungen und deren Anwendung basieren auf unseren Erfahrungen, Erfahrungen unserer Anwender, zahlreichen Studien zur

Grundlagenforschung und Veröffentlichungen zu bestimmten Wirkweisen des pulsierenden Magnetfeldes.

Haftung

Der Einsatz von pulsierenden Magnetfeldsystemen ist von der medizinischen Wissenschaft nicht anerkannt. Vor einer Anwendung befragen Sie Ihren Tierarzt oder

erfahrenen Pferdetherapeuten nach Risiken und Nebenwirkungen. Wir, als Hersteller schließen jegliche Haftung aus.

Service

Bitte sprechen Sie Einsendungen zuvor telefonisch (+49 6151 307 67 47) mit uns ab, um sicherzustellen, dass es sich wirklich um einen Defekt des richtigen Set-Bestandteils (Steuergerät oder Applikator) und nicht um eine Fehlbedienung oder

eine anderweitige selbst behebbare Störung handelt.

Alle Sendungen müssen ausreichend frankiert sein – unfreie Sendungen können nicht angenommen werden.

Reparatur & Garantie für Steuergeräte	Reparatur & Garantie für Applikatoren
robutec equimag Service Im Hof 6 79618 Rheinfeldern-Minseln	Hans Herzog Magnetfeldgeräte equimag Service Köhnstraße 44 90478 Nürnberg

Bei allen Einsendungen legen Sie bitte Ihre Anschrift mit Namen, Straße, Land, Ort, Ihre Telefonnummer für Rückfragen und e-Mail Adresse in leserlicher Schrift bei. Keine Haftung bei nicht zustellbaren Rücksendungen aufgrund unleserlicher Angaben.

Bei Garantieansprüchen des Steuergerätes legen Sie das Dokument bei, aus der die Seriennummer des Steuergerätes hervorgeht sowie möglichst die Rechnung / Lieferschein; ansonsten besteht kein Garantieanspruch.

Kontakt

equimag bietet Ihnen als Kunde eine kostenlose **Anwendungshotline** an. Der frühere Sportreiter, Mitentwickler der equimag pulsierenden Magnetfeld-Therapie und Dipl. Ing.

Gert Geisel steht Ihnen mit seiner über 20-jährigen Erfahrung zur Magnetfeldbehandlung während üblicher Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Anwendungs-Hotline	Allgemeine Fragen
Gert Geisel	Manfred Bolz
International +49 175 672 38 56 National: 0175 672 38 56 zum üblichen Mobilfunk-Tarif Ihres Telefonanbieters	+49 6151 307 67 47 06151 307 67 47 Mobil: 0151 742 89 037
	equimag GmbH Riedstraße 2 64295 Darmstadt (bitte keine Paketeinsendungen ohne vorherige Absprache)

Garantie

36 Monate Garantie

Auf alle equimag – Produkte gewähren wir neben der gesetzlichen Gewährleistung von 24 Monaten beim Erwerb der Produkte über den Hersteller equimag GmbH weitere 12 Monate Herstellergarantie. Beim Kauf Ihrer Produkte über einen Händler oder equimag Beratungspartner wenden Sie sich zunächst an diesen primären Ansprechpartner.

Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Kabelbruch in den Applikatoren ist bei der Garantieleistung nicht eingeschlossen.

Versandkosten sind in der Garantieleistung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten nicht enthalten. Für Verschleiß am Steuergerät, den wiederaufladbaren Akkus und den Applikatoren übernimmt der Hersteller keine Garantie. Die Garantie beginnt ab Lieferdatum.

Die Garantie erlischt sofort:

- Bei technischen Veränderungen oder Reparaturversuchen am Steuergerät, den Applikatoren und dem Netzteil
- Bei unsachgemäßer Behandlung und Gewalteinwirkung
- Bei unsachgemäßer Reinigung der Applikatoren

Im Garantiefall bitte das Gerät sicher vor Beschädigungen auf dem Postweg verpacken. Sendungen unbedingt ausreichend frankieren. Unfreie Pakete und Sendungen werden nicht angenommen. Beachten Sie bitte: Postpäckchen sind nicht versichert und Pakete nur bis 500,00 €

Garantieleistungen können nur erfüllt werden, wenn Sie den Garantieschein oder den Kaufnachweis und im Falle des Garantieanspruchs des Steuergerätes das entsprechende Dokument (Rechnung, Lieferschein oder Packschein) mit Angabe der Seriennummer mit einsenden.

equimag GmbH
Riedstraße 2
64295 Darmstadt

☎ national:06151 307 67 47
☎ international:+49 6151 307 67 47
Mobil:.....0151 742 89 037
E-Mail:info@equimag.de

Geschäftsführer:
Manfred Bolz
Amtsgericht Darmstadt
HRB 101611